

ABSORBENT PAPER POINTS

牙科
吸潮纸尖

强吸水·耐分解·易进入

#015

#020

#025

#030

#035

#040

牙科吸潮纸尖

ABSORBENT PAPER POINTS



www.sw-perfect.com

- ① 尺寸:**
产品的尺寸符合YY 0711-2009中相应的图表的规定。
- ② 强吸水性:**
吸潮纸尖具有良好的吸水性,吸收的液体的高度至少高于液面10mm。
- ③ 耐分解性:**
吸潮纸尖被浸没于40°C±1°C的水中10min后用镊子从水中取出时不出现散开现象。



操作方法:

- ① 测量牙根管长度;
- ② 选定与牙根管长度相配的牙科吸潮纸尖的型号;
- ③ 用选定的牙科吸潮纸尖来祛除根管内的水分;
- ④ 每个牙根管用10~15个牙科吸潮纸尖;
- ⑤ 用牙科吸潮纸尖沾根管清洁糊剂来涂抹于牙根管里面,然后取出牙科吸潮纸尖;

系列	规格型号	包装规格
02 锥度	015 ,020 ,025 ,030 ,035 ,040 ,045 ,050 , 055 060 ,070 ,080 090 ,100 ,110 ,120 ,130 ,140	200支/盒
04 锥度	015 ,020 ,025 ,030 ,035 ,040 ,045 ,050 , 055 060 ,070 ,080	100支/盒
05 锥度	015 ,020 ,025 ,030 ,035 ,040 ,045 ,050 , 055 060 ,070 ,080	100支/盒
06 锥度	015 ,020 ,025 ,030 ,035 ,040 ,045 ,050 , 055 060 ,070 ,080	100支/盒
非标型号	XF(014 019),FF(017 025),MF(018 032) F(020 038), FM(023 041),M(024 054), ML(024 063),L(025 082),XL(027 083)	100支/盒
Protaper Type	F1(020 07),F2(025 08),F3(030 09) F4(040 06),F5(050 05)	100支/盒
Wave One GOLD	Small (020 07),Primary(025 07) Medium(035 06),Large(045 05)	100支/盒
Reciproc Type	R25(025 08),R40(040 06),R50(050 05)	100支/盒
Next Type	X1(020 04),X2(025 06),X3(030 07), X4(040 06),X5(050 06)	100支/盒

