

高效 | 易用 | 安全

perfect®
深圳葆丰

x4_p 穿山甲团

专用于特殊根管治疗的系统锉



材 料：蓝色镍钛合金 包装规格：4支/板 混装/单装 灭菌：134° C

型号规格	长度	转速	扭矩	横截面
○ 20/.07	19mm	350-500rpm	3.0N • cm	
● 15/.04	21,25,31mm	350-500rpm	1.5N • cm	
● 30/.04	21,25,31mm	1000rpm	1.0N • cm	
● 25/.02	21,25,31mm	800-1000rpm	1.0N • cm	



扫一扫公众号
获取更多产品资讯



甲1 开口锉

20/.07


经过特殊处理的开口锉，
用于根管口建立直线通道



甲2 疏通锉

15/.04


经过热处理的疏通锉，疏
通根管，可降低旋入效力

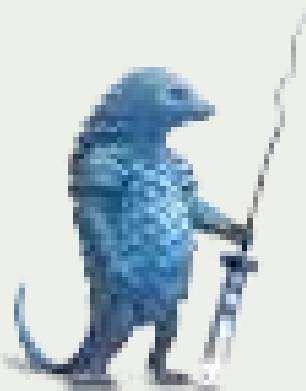


甲3 成型锉

30/.04


经过特殊热处理形成W形态成型锉，具有实现根管治疗的特殊能力，只有0.01锥度，可以通过在移动时重复和长时间停留在根管内来实现高达0.08的锥度，W形设计、超强弹性和极高的灵活性，以及高速和低扭矩的平稳旋转。

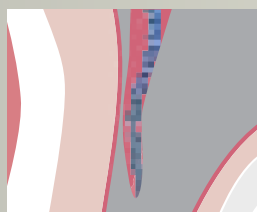


导管壁承受的应力最
小，降低了牙本质出
现微裂纹的风险

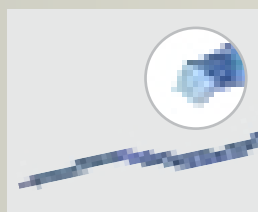


器械横截面非常小，磨损
不会积聚在根管结构中，
有效地去除微碎屑

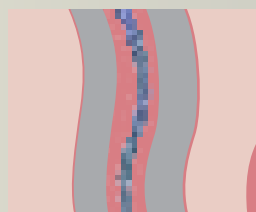

适应通道的形状

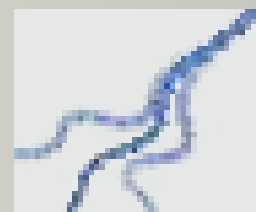

优异的抗循环疲劳性能

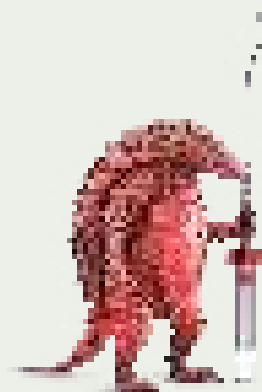

甲4 清扫锉

25/.02

经过特殊热处理形成C型
根管形态的清扫锉，使用
清扫锉进行深度清洁，可
以获得最佳根管预备效果

临床适应症选择

① 它适应这些根管形态：

解剖结构不规则根管，如过于粗大根管、C形根管、扁形根管、存在根管峡部、管间交通支、根管鳍部、根管内吸收、根尖部开放等。

② 再治疗的时候，你可以这样做：

再治疗时，对根管不规则结构中残留的牙胶、糊剂、感染物的清理，配合溶剂清理根尖区及部分超出根尖的牙胶。

③ 其它器械发生分离时，它还可以这样提取：

根管弯曲小于30度，分离器械长度超过4.5mm，已形成有效旁路时，超声法无法取出，可以用XP锉进行提取尝试。

★常规根管预备后，需要加强清理及冲洗液活化时。